



採取に関する注意:

採取前に、スポンジの先端が他の表面に接触しないようにしてください。

口腔のサンプル採取前の30分間は、ドナーは飲食、喫煙、およびガムを噛むことは控えてください。

使用目的: この製品は、人の口腔サンプルからDNAを採取および安定化させるためのものです。

内容物: 1つの採取キットが梱包されています

警告および注意: 窒息の危険性。スポンジを口に入れる際には注意してください。

保存溶液が目に入ったとき皮膚に接触した場合は、水で洗い流してください。体内に摂取しないでください。
www.dnagenotek.comで製品安全データシートをご確認ください

保管: 15°C-25°C

キットの概要および説明: ORACollect-DNAは、人の口腔サンプルを採取するための器具と説明書を含む自己採取キットです。

ラベルの説明:

- カタログ番号
- 試験管内での診断医学装置
- CEマーク
- UKCAマーク
- 製造元
- 医療機器
- 再使用しないでください
- 使用方法については使用上の注意をご覧ください
- 使用期限
- ロット番号
- 認可代表者

日本語

サンプル採取に関する指示書:

	<p>パッケージを開けて、スポンジの先端に触らないようにしながら採取具を取り出してください。不快に感じない程度までスポンジを口の奥まで入れて、下歯茎に沿って(拡大図を参照)前後にこすり付けてください。優しく10回歯茎にこすり付けてください。可能なら、歯にこすり付けないようにしてください。</p>
	<p>さらに10回、口の反対側で下歯茎に沿って優しくこする動作を繰り返してください。</p>
	<p>チューブを真っすぐ立てた状態に保ち、チューブ内の保存溶液がこぼれないようにしてください。スポンジに触らないようにしながら、青色のキャップを採取チューブから外してください。</p>
	<p>キャップを上下逆さまにして、スポンジをチューブに差し込み、キャップをしっかり閉めてください。</p>
	<p>キャップを閉めたチューブを逆さまにして、15回激しく振ってください。</p>