




# ORagene®DNA

REF OG-500 ja OG-510

REF OG-600 ja OG-610

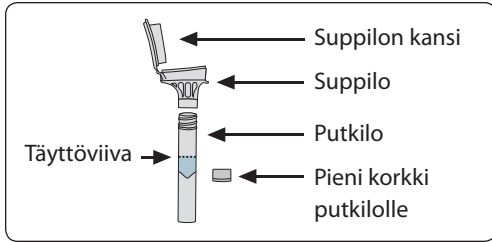

## Pakkauksen yhteenveto ja selitykset:

**ÄLÄ SYÖ, juo, tupakoi tai pureskele purukumia 30 minuuttiin ennen sylkinäytteen antamista.**

**ÄLÄ poista muovikalvoa suppilon kannesta.**

**Käyttötarkoitus:** ihmisen DNA:n keräämiseen sylkinäytteestä.

**Sisältö:** pakkaus sisältää stabilointinestettä.

**Varoitukset ja varoimet:** jos stabilointinestettä joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee vedellä. Ei saa niellä. Katso käyttöturvallisuustiedote (KTT) sivulta: [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Pieni korkki, tukehtumisvaara.

**Säilytys:** 15°C / 30°C

## Pakkauksen yhteenveto ja selitykset:

Oragene-DNA on itsekäyttävä pakkaus, joka sisältää materiaalit ja ohjeet sylkinäytteen keräämiseen ja stabilointiin.

## Seloste:


- Katso pakkausseloste
- Kerää syljestä (käyttö)
- In vitro diagnostiset lääkkinnälliset laitteet
- Kataloginnumero
- CE-merkintä
- Huomio, katso käyttöohjeet
- Säilytysohjeet
- Valtuutettu edustaja
- Valmistaja
- Eränumero

## KÄYTTÖOHJEET


Lue käyttöohjeet ennen näytteenottoa.

### Menettely:


**Vaiheiden yhdestä viiteen mukainen sylkinäytteen ottaminen kestää yleensä 2-5 minuuttia.**

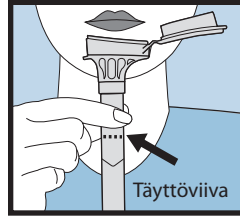


- 1 Sylje suppiloon, kunnes nestemäisen syljen määrä (ei kuplia) saavuttaa kuvassa 1 näytetyn täyttöviivan.

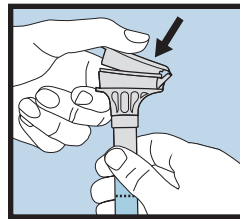


- 2 Pidä putkiloa pystyasennossa yhdellä kädellä. Sulje suppilon kansi toisella kädellä (kuten kuvassa) painamalla kantta lujasti, kunnes kuulet sen napsahdavan. Kannessa oleva neste vapautuu putkiloon ja sekoittuu syljen kanssa. Varmista, että kansi on tiukasti kiinni.

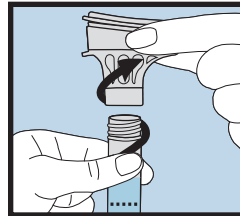

- 3 Pidä putkiloa pystyasennossa. Kierrä suppilo irti putkilosta.

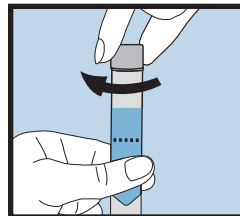

- 4 Sulje putkilo tiukasti pienen korkin avulla.

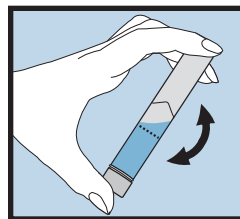

- 5 Ravista korkillista putkiloa 5 sekunnin ajan. Hävitä suppilo.



Ainoastaan in vitro-diagnostiseen käyttöön

**DNAgenotek**



Valmistettu Kanadassa  
DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Erinomaisia näytteitä  
todistettu tulos*

Puh.: +1.613.723.5757  
Faksi: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene®-DNA ei ole myynnissä Yhdysvalloissa.

\*Oragene on DNA Genotek Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Joitakin DNA Genotek tuotteita ei ehkä ole saatavilla kaikkialla, ota yhteyttä myynti edustajaan.

DNA Genotek protokollat, valkoiset kirjat ja soveltaminen toteaa, ovat saatavilla tukiosista kotisivuiltamme [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patentti ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2017 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies Inc. -yhtiön tytäryhtiö, kaikki oikeudet pidätetään.  
PD-PR-00440 (FI- Finnish) Issue 2/2017-02