

Rinkinio santrauka ir paaiškinimas:

„OMNigene-GUT“ pateikia medžiagas ir instrukcijas mikrobiomui DNR išmatų mėginiui imti ir stabilizuoti.






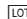
Įspėjimai ir perspėjimai

- SKIRTA TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI.
- NENUIMKITE nuo vamzdelio geltono vamzdelio antgalio.
- NEIŠPILKITE vamzdelyje esančio stabilizavimo skysčio.
- Skysčiu patekus į akis arba ant odos, nuplaukite vandeniu. NEPRARYKITE.
- Jei imate skystų išmatų mėginį, žr. atskirai pateiktas naudotojo instrukcijas.
- Mažos dalys gali sukelti uždusimo pavojų.

Saugojimas: 15 °C iki 25 °C

Siųskite laikydamiesi galiojančių teisės aktų, kuriais reglamentuojamas biologinių mėginių gabenimas. Žr. MSDS, pateiktą www.dnagenotek.com

Etiketės simbolių aiškinimas:

-  Paimti mėginį iki (panaudoti iki)
-  Katalogo numeris
-  Gamintojas
-  15°C / 25°C Saugojimo instrukcijos
-  Dėmesio, skaitykite naudojimo instrukcijas
-  Partijos numeris

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


Prieš imdami mėginį perskaitykite visas instrukcijas


Procedūra:




- 1 SVARBŪS PARUOŠIAMIEJI DARBAI:**
- Prieš pradėdami mėginio ėmimo procedūrą ištuštinkite pūslę.
 - Imkite išmatų mėginį, kuriame nėra šlapimo ar tualetinio vandens.
 - Gali prireikti tualetinio popieriaus arba servetėlių.



- 2** Laikydami už geltono vamzdelio galo nusukite TIK violetinį gaubtelį ir atidėkite, jis bus naudojamas vėliau.
- SVARBU!** NENUIMKITE geltono vamzdelio antgalio. NEIŠPILKITE vamzdelyje esančio stabilizavimo skysčio.
- 
- Neišliekite**

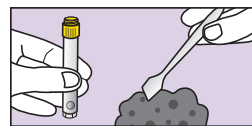

- 3** Mentelę paimkite nedidelį išmatų mėginį.

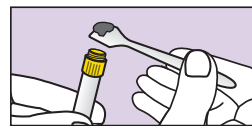

- 4** Perkelkite fekalijų mėginį į geltoną vamzdelio galą. Kartokite, kol mėginys užpildys geltoną vamzdelio galą.



SVARBU! NESPAUSKITE mėginio į vamzdelį.




- 5** Nubraukite vamzdelio antgalį horizontaliai, kad išlygintumėte mėginį ir pašalintumėte jo perteklių.
- Prireikus nušluostykite vamzdelio išorę ir viršų tualetiniu popieriumi arba servetėle.



- 6** Laikydami violetinį gaubtelį vientisu galu žemyn prisukite jį ant geltono vamzdelio antgalio, kad jis būtų sandariai uždarytas.



- 7** Mažiausiai 30 sekundžių kratykite užsandarintą vamzdelį, kiek galėdami stipriai ir greičiau judindami pirmyn ir atgal.

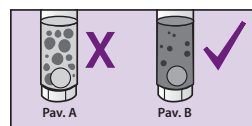

- 8** Išmatų mėginys susimaišys su vamzdelyje esančiu stabilizavimo skysčiu; ištirps ne visos dalelės.
- SVARBU!** Jeigu lieka **didelių** dalelių, kaip pavaizduota paveikslėlyje A, kratykite toliau.



- 9** Įdėkite mentelę į originalią pakuotę arba suvyniokite į tualetinį popierių ir išmeskite su atliekomis.
- SVARBU!** Išsiųskite mėginį apdoroti laikydamiesi atskirų pristatymo instrukcijų, kurias pateikia rinkinio tiekėjas.