

# OM-AC1 馬桶配件

與  OMNigene®GUT 一併使用


## 使用說明

這款馬桶配件應與 OMNigene®GUT 套組配合使用，以收集糞便樣本。


**注意:** 不要讓馬桶水、尿液、洗滌劑或香氛劑接觸到這款馬桶配件。

**儲存溫度:** 15°C 到 25°C


**程序:**

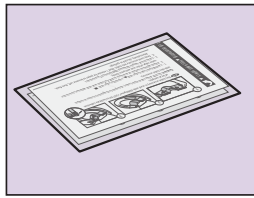


**1** 第一次嘗試時未能收集到樣本，故內含兩個馬桶配件。

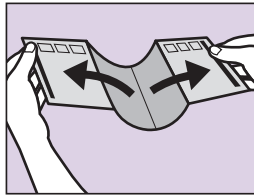

**2** 小心撕開標有 ▲ 的一邊；■ 邊也重複相同步驟。

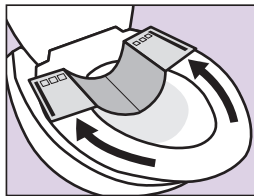

**3** 將配件的黏合表面貼上馬桶座圈的後面，黏合表面應緊貼座圈的外沿，並被牢固地壓緊。

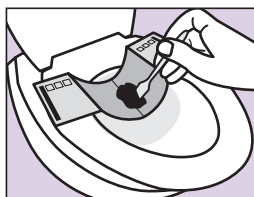

**4** 按照 OMNigene®GUT 使用說明收集糞便樣本。



**5** 將用過的配件丟進馬桶。1 分鐘後，待紙張變軟後沖水。亦可丟進垃圾桶。

1 分鐘

**DNA genotek**



OM-AC1 在荷蘭  
為 DNA Genotek Inc 製造 •  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

優質樣本  
經驗證的實效

電話: +1.613.723.5757  
傳真: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNigene 是 DNA Genotek Inc. 的註冊商標。

一些 DNA Genotek 產品可能未在所有地理區域內提供，請聯繫您的銷售代表以獲取更多詳情。

所有 DNA Genotek 協議、白皮書和使用說明書均可從我們的網站 ([www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)) 上的支援部分獲取。

專利 ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2018 年所有版權歸 DNA Genotek Inc. ( OraSure Technologies, Inc. 的一家附屬公司 ) 所有。

PD-PR-00845 (ZH - Traditional Chinese) Issue 1/2018-11

