

**채취 주의사항:**

갈때기 뚜껑에서 플라스틱 필름을 떼지 마십시오.

공여자의 입에 넣기 전, 매번 스펀지가 손상되었는지 확인하십시오. 첫 번째 스펀지가 닳거나 찢어진 흔적이 보이면 두 번째 스펀지를 사용하십시오.

다른 스펀지나 면봉으로 대체하지 마십시오.

사용 용도: 타액 샘플로부터 인간 DNA 채취 지원.

내용물: 키트에는 안정액이 들어있습니다.

**경고 및 사용상 주의사항:**

**질식 위험:**

- 채취 키트 내 작은 뚜껑.
- 스펀지가 들어있는 플라스틱 백.
- 스펀지를 공여자의 입에 넣을 때 주의해야 합니다.

**감독 대상 채취의 경우:**

- 공여자를 방치하지 마십시오.
- 공여자가 스펀지, 작은 뚜껑 또는 포장물 취급하지 않도록 하십시오.
- 안정액이 눈이나 피부에 닿았다면 물로 씻어냅니다. 섭취하지 마십시오. [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)에서 MSDS를 참조하십시오.

보관: 15°C / 30°C

**키트 요약 및 설명:**

Oragene-DNA는 타액 검체를 채취하고 안정화시키는 물질과 지침을 제공하는 채취 지원 키트입니다.

**라벨 기호 표시:**

- 제품 설명서를 참조하십시오
- 타액 채취자(사용자)
- 생체 외 진단용 의료기기
- 카탈로그 번호
- CE 마크
- 주의, 사용 설명서 참조
- 보관 지침
- 승인된 담당자
- 제조사
- 로트 번호

**사용 지침**


채취 전 모든 지침을 숙지하십시오

**절차:**


타액 샘플을 채취하기 전 30분 동안 공여자가 음식과 물을 섭취하지 않고, 흡연을 하거나 껌을 씹지 않도록 하십시오.

샘플을 채취하는 동안 공여자가 똑바른 자세로 있는지 확인하십시오.

1~7단계에 따라 타액 샘플을 채취하는 데 최대 15분이 걸릴 수 있습니다.

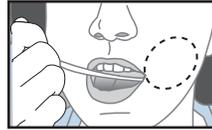

**1** 입안의 볼에 스펀지 1개를 넣습니다. 가능한 많은 타액이 흡수될 수 있도록 30초 동안 잇몸과 볼 안쪽을 따라 스펀지를 부드럽게 움직입니다.

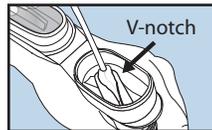

**2** 스펀지가 타액으로 흠뻑 젖으면 갈때기의 V-notch에 스펀지를 삽입합니다. V-notch 내벽에 대고 스펀지를 비틀거나 눌러 타액이 스펀지 밖으로 나오도록 합니다. 타액이 튜브로 흐릅니다.



**3** 타액이 채움 선에 도달할 때까지 같은 스펀지를 사용하여 1~2단계를 반복합니다. 공여자의 입에 넣기 전, 매번 스펀지가 손상되었는지 확인하십시오. 첫 번째 스펀지가 닳거나 찢어진 흔적이 보이면 두 번째 스펀지를 사용하십시오.


튜브를 단단한 표면에 대고 두드려 거품의 수를 줄이십시오.



**4** 튜브를 똑바로 하여 한 손으로 잡습니다. 다른 손으로 (그림과 같이) 뚜껑을 딸깍 소리가 날 때까지 단단히 눌러 뚜껑을 닫습니다. 뚜껑에 있는 액체가 튜브로 방출되어 타액과 섞입니다. 뚜껑이 단단히 닫혔는지 확인하십시오.



**5** 튜브를 잡고 똑바로 세웁니다. 튜브에서 갈때기를 폅니다.

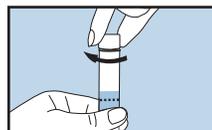

**6** 작은 뚜껑으로 튜브를 단단히 닫습니다.



**7** 뚜껑을 닫은 튜브를 5초간 흔듭니다. 갈때기와 스펀지를 버립니다.

