

Mjere opreza pri prikupljanju:

NEMOJTE jesti, piti, pušiti, žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije davanja uzorka.

NEMOJTE uklanjati plastičnu foliju s poklopca lijevka.

Sadržaj: komplet sadrži tekućinu za stabilizaciju.

Upozorenja i mjere opreza:

Ispirite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati. Pogledajte MSDS na www.dnagenotek.com

Mali čep predstavlja moguću opasnost od gušenja.

Čuvanje: 15 °C / 30 °C

Sažetak i objašnjenje kompleta:

OMNigene-ORAL je komplet za samoprikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje i stabilizaciju uzoraka pljuvačke.

Legenda etiketa:

	Prikupiti uzorak do (upotrijebiti do)
	Dijagnostički medicinski uređaj In vitro
	Kataloški broj
	CE oznaka
	Proučite umetak u pakiranju
	Oprez, proučite upute za uporabu
	Upute za čuvanje
	Proizvođač
	Ovlašteni predstavnik
	Broj serije


Prikupljeni uzorak potencijalno je zarazan i potrebno je primjenjivati odgovarajuće postupke biološke sigurnosti.

Slati u skladu s važećim propisima za prijevoz bioloških uzoraka.


Upute o prikupljanju za davatelje na drugim jezicima potražite na www.dnagenotek.com

UPUTE ZA KORISNIKE


Većini ljudi potrebno je 2 do 5 minuta za davanje uzorka ako slijede korake od 1 do 5.

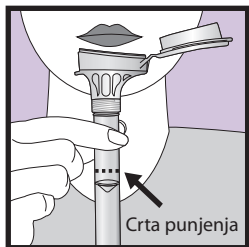


1 Pljujte u lijevak dok količina tekućine (ne mjehurići) ne dosegne crtu punjenja prikazanu na slici 1.

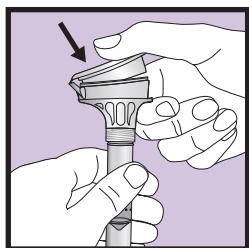


2 Držite epruvetu jednom rukom u uspravnom položaju. Zatvorite poklopac lijevka drugom rukom (kao što je to prikazano) čvrsto ga gurajući dok ne čujete glasan klik. Tekućina će se iz poklopca ispustiti u epruvetu radi miješanja s uzorkom. Poklopac čvrsto zatvorite.

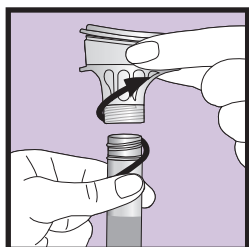

3 Držite epruvetu uspravno. Odrnite lijevak s epruvete.

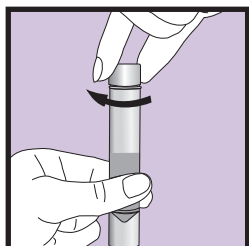

4 Malim čepom čvrsto zatvorite epruvetu.

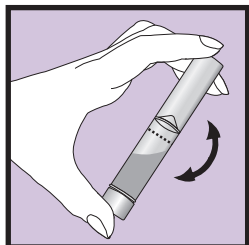

5 Protresajte začepljenu epruvetu 5 sekundi. Bacite ili reciklirajte lijevak.