


**Mintagyűjtési óvintézkedések:**

**Gondoskodjon arról, hogy a szivacsos hegy NE érintkezzen semmilyen felülettel a mintavétel előtt.**

**A donor NEM ehet, ihat és dohányozhat, illetve nem használhat rágógumit a nyálminta gyűjtése előtt 30 percig.**

**Rendeltetészerű használat:** Ez a termék emberi nyálmintából származó DNS gyűjtésére és stabilizálására szolgál.

**Tartalom:** 1 db mintagyűjtő készletet tartalmaz












**Figyelmeztetések és óvintézkedések:** Fulladásveszély. A szivacs szájba helyezésekor óvatosan kell eljárni.

Ha a stabilizáló folyadék a szemével vagy a bőrével érintkezik, mossa le vízzel. NE nyelje le. Az anyagbiztonsági adatlapot (MSDS) a [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) honlapon tekintheti meg

**Tárolás:** 15 °C-25 °C

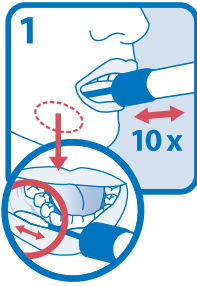
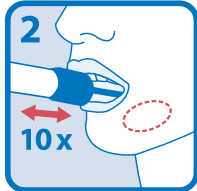

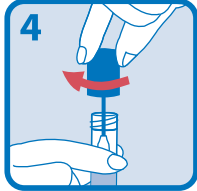
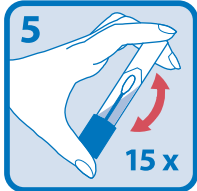
**Összefoglaló és magyarázat a készlethez:** Az ORACollect-DNA egy olyan készlet, amellyel önmaga gyűjthet mintát, és amely tartalmazza az emberi nyálminták gyűjtéséhez szükséges anyagokat és utasításokat.

**A címkén lévő jelmagyarázat:**

	Katalógusszám
	In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
	CE-jelölés
	UKCA-jelölés
	Gyártó
	Orvostechnikai eszköz
	Ne használja újra
	Olvassa el a használati utasítást
	Felhasználható
	Tételszám
	Meghatalmazott képviselő

## MAGYAR

**Mintagyűjtési utasítások:**

	<p>Bontsa fel a csomagot és vegye ki a gyűjtőeszközt anélkül, hogy a szivacsos hegyhez érne. Helyezze a szivacsot olyan hátulra a szájban, amennyire még kényelmes, és dörzsölje az alsó fogínyhez (lásd a közeli képet) előre-hátra irányú mozdulatokkal. Dörzsölje meg finoman a fogínyt 10 alkalommal. A fogakat lehetőség szerint ne dörzsölje.</p>
	<p>Ismételje meg a finom dörzsölő mozdulatot a száj másik oldalán az alsó fogínyen további 10 alkalommal.</p>
	<p>Tartsa függőlegesen a csövet, hogy a benne lévő stabilizáló folyadék ne folyjon ki. Csavarja le a kék kupakot a gyűjtőcsőről anélkül, hogy a szivacsos hegyhez érne.</p>
	<p>Fordítsa fejjel lefelé a kupakot, illessze a szivacsot a csőbe, majd zárja le szorosan a kupakot.</p>
	<p>Fordítsa meg a lezárt csövet, és rázza meg erőteljesen 15-ször.</p>