

Příprava k odběru:

NESNÍMEJTE plastovou fólii z víčka nálevky.

Než vložíte hubku do úst dárce, vždy zkontrolujte, jestli není poškozená. Jestliže jsou na ní jakékoli známky opotřebení nebo poškození, použijte druhou hubku.

NEPOUŽÍVEJTE namísto ní jiné hubky nebo tampony.

Určené použití: K asistovanému odběru lidské DNA ze vzorků slin

Obsah: Obsahuje 1 odběrovou sadu

Upozornění a opatření:

Nebezpečí udušení:

- Odběrová sada obsahuje malý uzávěr.
- Plastový sáček obsahuje hubky.
- Při vložení hubky do úst dárce je nutno postupovat opatrně.

Pro odběr pod dohledem:

- NENECHÁVEJTE dárce bez dohledu.
- NEDOVOLTE dárce manipulovat hubkou, uzávěrem nebo obalem.
- Pokud se stabilizační tekutina dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, omyjte je vodou. NEPOŽÍVEJTE. Podívejte se na bezpečnostní list (MSDS) na webu www.dnagenotek.com.

Uchování: 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)

Shrnutí a vysvětlení k sadě:

Oragene-DNA je sada k asistovanému odběru vzorků, obsahující materiály a pokyny k odběru a stabilizaci vzorků slin.

Legenda ke štítku:

REF	Katalogové číslo
MD	Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
CE	Označení CE
UK	Označení UKCA
UK	Výrobce
MD	Zdravotnický prostředek
MD	Nepoužívejte opakovaně
i	Přečtěte si pokyny k použití
i	Odeberte vzorek slin do (použitelné do)
LOT	Číslo šarže
EC REP	Pověřený zástupce
!	Upozornění

Pokyny pro uživatele


Před odběrem vzorků si přečtěte všechny pokyny.

Postup:


Po dobu 30 minut před odběrem vzorku slin dárce NESMÍ jíst, pít, kouřit nebo žvýkat žvýkačku.

Při odebrání vzorku musí být dárce ve vzpřímené poloze.


Odběr vzorku slin podle kroků 1 až 7 může vyžadovat až 15 minut.

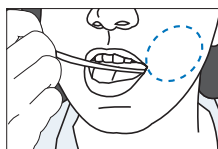

- 1** Vložte jednu hubku mezi vnitřní stranu tváře a dásně. Zlehka pohybujte hubkou po dásni a vnitřní straně tváře po 30 sekund, aby do ní nasáklo co nejvíce slin.

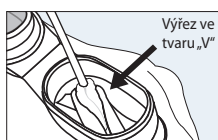


- 2** Až bude hubka nasycena slinami, vložte ji do výřezu ve tvaru „V“ na nálevce. Vyždímejte sliny z hubky tak, že ji budete otáčet a přitlačovat ji k vnitřní stěně výřezu. Sliny budou stékat do zkumavky.

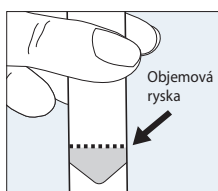

- 3** Opakujte tyto kroky (1 a 2) S POUŽITÍM STEJNÉ HUBKY, dokud tekuté sliny (nikoli bublinky) nedosáhnou po objemovou rysku. Než vložíte hubku do úst dárce, vždy zkontrolujte, jestli není poškozená. Jestliže jsou na ní jakékoli známky opotřebení nebo poškození, použijte druhou hubku.


Poklepejte dnem zkumavky o tvrdý povrch, aby se zmenšilo množství bublinek.

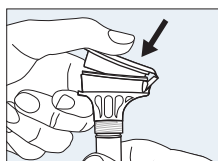


- 4** Jednou rukou držte zkumavku ve svislé poloze. Druhou rukou zavřete pevným stlačením víčko, dokud hlasitě nezaklapne. Z víčka se uvolní tekutina a steče do zkumavky, kde se promísí se slinami. Ujistěte se, že je víčko pevně zavřené.



- 5** Držte zkumavku ve svislé poloze. Odšroubujte nálevku od zkumavky.

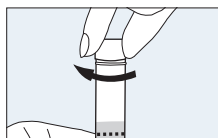

- 6** Zavřete pevně zkumavku malým uzávěrem.

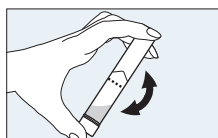

- 7** Uzavřenou zkumavku protřepávejte po 5 sekund. Zlikvidujte nálevku a hubky.