

Ettevaatusabinõud proovivõtmisel:

MITTE eemaldada lehteri kaanelt plastkilet.

Kontrollige käsna kahjustuste suhtes iga korda enne selle sisestamist doonori suhu. Kasutage lisakäsna, kui märkate esimesel käsnal kahjustusi.

MITTE kasutada asendusena teisi käsnu või tampoone.

Kavandatud kasutus: inim-DNA assisteeritud kogumiseks süljeproovidest

Sisu: sisaldab 1 proovivõtukomplekti

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

Lämbumisoht:

- Väike kork proovivõtukomplektis.
- Käsna sisaldav kilekott.
- Olge käsna doonori suhu sisestades ettevaatlik.

Järelevalvega proovivõttud:











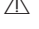

- MITTE jätta doonorit järelevalveta.
- MITTE lubada doonoril käsna, väikest korki või pakendit käsitseda.
- Peske veega, kui stabiliseeriv vedelik satub silma või nahale. MITTE alla neelata. Vt MSDS-i veebilehelt www.dnagenotek.com.

Säilitamine: 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)

Komplekti kokkuvõtlik selgitus:

Oragene-DNA on assisteerimisega kasutatav proovivõtukomplekt, mis sisaldab materjale ja juhiseid süljeproovide kogumiseks ja stabiliseerimiseks.

Etiketi tekst:

	Katalooginumber
	In vitro diagnostika meditsiinease
	CE-märgis
	UKCA-märgis
	Tootja
	Meditsiinease
	Mitte kasutada uuesti
	Vaadake kasutusjuhendit
	Süljeproov võtta enne (Kõlblik kuni)
	Partii number
	Volitatud esindaja
	Ettevaastus

Kasutusjuhend

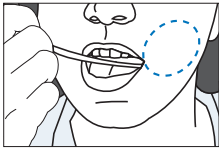

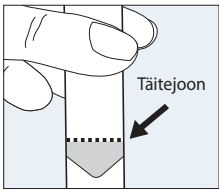
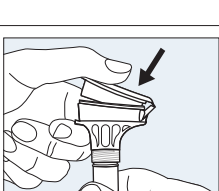
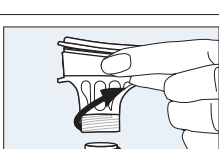
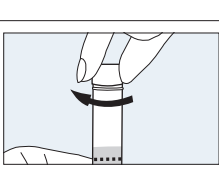
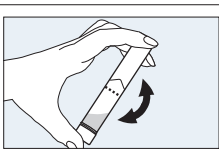
Lugege kasutusjuhend enne proovivõtmist hoolikalt läbi.

Protseuur:

Kindlustage, et doonor EI sööks, jooks, suitsetaks või näriks närimiskummi 30 minuti jooksul enne süljeproovi võtmist.

Kindlustage, et doonor on proovivõtmise ajal püstises asendis.

Järgides samme 1 kuni 7, võib proovivõtmine võtta kuni 15 minutit.

	<p>1 Pange üks käsna põsekotti. Liigutage käsna õrnalt mööda igemeid ja põskede sisepindu 30 sekundi jooksul, et imada käsna võimalikult palju sülge.</p>
	<p>2 Kui käsna on küllastunud süljega, sisestage see lehteri V-kujulisse sätku. Väänake sülg käsna välja, vääntes ja surudes käsna vastu V-kujulise sätku sisse. Sülg voolab tuubi.</p>
	<p>3 Korrake neid samme (1 kuni 2), KASUTADES SAMA KÄSNA, kuni süljavedeliku (mitte mullide) tase jõuab täitejooni. Kontrollige käsna kahjustuste suhtes iga korda enne selle sisestamist doonori suhu. Kasutage lisakäsna, kui märkate esimesel käsnal kahjustusi. Koputage tuubi põhja vastu kõva pinda, et vähendada mullide kogust.</p>
	<p>4 Hoidke tuubi ühe käega püstises asendis. Sulgege kaas teise käega, vajutades tugevalt kaanele, kuni kuulete valju klõpsatust. Kaanes olev vedelik vabastatakse tuubi, kus see seguneb süljega. Veenduge, et kaas on tihedalt suletud.</p>
	<p>5 Hoidke tuubi püstises asendis. Keerake lehter tuubi küljest lahti.</p>
	<p>6 Kasutage väikest korki, et tuub tihedalt sulgeda.</p>
	<p>7 Raputage korgiga suletud tuubi 5 sekundit. Visake lehter ja käsna ära.</p>