
Keräämisen varotoimet:

ÄLÄ poista muovikalvoa suppilon kannesta.

Tarkasta sieni vaurion varalta joka kerta ennen kuin viet sen lahjoittajan suuhun. Käytä toista sientä, jos ensimmäisessä sienessä näkyy merkkejä kulumisesta.

ÄLÄ korvaa muilla sienillä tai vanupuikoilla.

Käyttötarkoitus: Ihmisen DNA:n avustettu kerääminen sylkinäytteistä

Sisältö: Sisältää yhden keräyspakkauksen

Varoitukset ja varotoimet:
Tukeutumisvaara:

- Pieni korkki keräyspakkauksessa.
- Sienet sisältävä muovipussi.
- Varovaisuutta on noudatettava, kun sieni asetetaan luovuttajan suuhun.

Valvottu kerääminen:












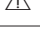
- ÄLÄ jätä lahjoittajaa yksin.
- ÄLÄ anna lahjoittajan käsitellä sientä, pientä korkkia tai pakkausta.
- Pese vedellä, jos stabilointinestettä joutuu silmiin tai iholle. Ei saa niellä. Katso MSDS sivustolla www.dnagenotek.com.

Säilytys: 15–30 °C (59–86 °F)

Pakkauksen yhteenveto ja selitys:

Oragene-DNA on avustettu keräyspakkaus, joka sisältää materiaalit ja ohjeet sylkinäytteiden keräämiseksi ja stabiloinniksi.

Tarraselite:

-  Luettelonumero
-  In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite
-  CE-merkintä
-  UKCA-merkintä
-  Valmistaja
-  Lääkinnällinen laite
-  Älä käytä uudelleen
-  Katso käyttöohjeet
-  Kerää sylki (käytä) ennen
-  Eränumero
-  Valtuutettu edustaja
-  Varoitus

Käyttöohjeet

Lue ohjeet kokonaan ennen keräämistä.

Toimenpide:

Varmista, että lahjoittaja EI syö, juo, tupakoi tai käytä purukumia 30 minuuttia ennen sylkinäytteen keräämistä.

Varmista, että lahjoittaja on pystysuorassa asennossa näytettä kerätettäessä.

Vaiheita 1–7 seuraten sylkinäytteen kerääminen kestää enintään 15 minuuttia.

	<p>1 Aseta yksi sieni sisäposken alaosaan. Liikuta sientä varovasti ikeniä ja poskien sisäpuolta pitkin 30 sekunnin ajan, jotta sylkeä imeytyy mahdollisimman paljon.</p>
	<p>2 Kun sieni on kyllästynyt syljellä, työnnä sieni suppilon V-loveen. Purista sylki pois sienestä kiertämällä ja työntämällä sitä V-loven sisäseinää vasten. Sylki valuu putkeen.</p>
	<p>3 Toista nämä vaiheet (1–2) KÄYTTÄEN SAMAA SIENTÄ, kunnes nestemäinen sylki (ei kuplia) saavuttaa täyttörajan. Tarkasta sieni vaurion varalta joka kerta ennen kuin viet sen lahjoittajan suuhun. Käytä toista sientä, jos ensimmäisessä sienessä näkyy merkkejä kulumisesta.</p> <p>Napauta putken pohjaa kovaa pintaa vasten kuplien määrän vähentämiseksi.</p>
	<p>4 Pidä putkea pystyasennossa yhdellä kädellä. Sulje kansi painamalla sitä lujasti toisella kädellä, kunnes kuulet äänekkään loksahduksen. Kannessa oleva neste vapautuu putkeen ja sekoittuu sylkeen. Varmista, että kansi on suljettu tiukasti.</p>
	<p>5 Pidä putki pystyasennossa. Kierrä suppilo irti putkesta.</p>
	<p>6 Sulje putki tiukasti pienellä korkilla.</p>
	<p>7 Ravista korkilla suljettua putkea 5 sekunnin ajan. Hävitä suppilo ja sienet.</p>