



جمع الحمض النووي (DNA) من اللعاب

اجمع عينات حمض نووي (DNA) ذات جودة عالية لإجراء تشخيص جزيئي باستخدام جهاز مرخص من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA).[†]

تبدأ الاختبارات الجينية بجمع عينات حمض نووي (DNA). استخدم Oragene•Dx® من أجل جمع وتثبيت ونقل مثبت الجودة لعينات حمض نووي (DNA) من اللعاب.

- حمض نووي (DNA) ذو جودة عالية وكمية كبيرة+
- عملية جمع ذاتي سريعة وموثوق بها
- ثبات طويل الأمد للعينية في درجة حرارة الغرفة
- يتم النقل والتخزين في درجة حرارة الغرفة
- مدمج بالمنتج رمز شريطي أحادي البعد + رمز شريطي ثنائي الأبعاد
- اختياري الجزء السفلي من أجل كفاءة سير العمل بالمعمل



يمكن لجهات تصنيع الاختبارات المعملية واختبارات التشخيص الجزيئي المطورة تقليل الوقت والعبء التنظيمي لتقديم الطلبات إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) من خلال الاستفادة من ترخيص 510(k) الخاص بجهاز Otagene•Dx.

لطلب مجموعات جمع عينات مجانية، اذهب إلى الموقع الإلكتروني www.dnagenotek.com

استخدم مجموعتك بطريقة المفضلة.

تجمع مجموعة Oragene-Dx 610 بين إمكانية جمع عينات بطريقة سهلة وعالية الجودة مع القدرة على تخصيص الجهاز ليلانم احتياجاتك. طول الأنبوب والخصائص المانعة للدوران من أجل الأداء الآلي وخيارات الرمز الشريطي المحسنة، كل ذلك يمنحك مرونة قصوى من أجل تخزين العينات ومعالجتها والقدرة على تتبعها. إن خدمات GenoFIND™ متاحة لتلبية احتياجات إدارة العينات الخاصة بك.

حجم العينة	التهينة الموصى بها	المميزات العملية	مميزات الجمع والنقل والتخزين	الخدمات الإضافية
جمع عينة صغيرة إلى متوسطة الحجم	مجموعة 610 القياسية مع رمز شريطي أحادي البعد على الأنبوب	• ملائم للمعالجة اليدوية • نزع الأغشية الآلي (إنتاجية منخفضة إلى متوسطة) • تتبع العينات من خلال رمز شريطي أحادي البعد على الأنبوب	• غير باضع • جمع عينات مركزي أو في المنزل • عملية جمع سهلة وسريعة تتم بشكل ذاتي • التعليمات متاحة بعدة لغات • الشحن من خلال نظام البريد العادي • لا يلزم استخدام سلسلة تبريد • يقلل التصميم الصغير مساحة التخزين • عملية جمع سهلة وسريعة تتم بمساعدة شخص آخر	• تعبئة مخصصة للعينات • تمييز العلامة التجارية • إمكانية كاملة لتلبية الاحتياجات • التوجيه التنظيمي • إرسال الملحقات عبر البريد • خدمات Wet lab في معمل حاصل على اعتماد GLP/CLIA
جمع عينة كبيرة الحجم	مجموعة 610 القياسية مع رمز شريطي أحادي البعد على الأنبوب • رمز شريطي ثنائي الأبعاد اختياري مطابق بالجزء السفلي*	• الآلي (إنتاجية عالية) • تتبع العينات مع خيار المسح الضوئي المسطح		

* لا يوجد قاع مزيف في التهينات ذات الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد

GENOFIND™
Services

دعم وتحليل واعداد تقارير بالبيانات فائق الدقة

مواصفات محتويات العبوة وتعبئتها

للاطلاع على المواصفات الكاملة الخاصة بالوزن والأبعاد، راجع PD-BR-00233 على موقعنا الإلكتروني.

الأبعاد: $2.8 \times 7.5 \times 14.0$ سم

الوزن: 37 جراماً

مدة الصلاحية: 30 شهراً في درجة حرارة الغرفة

ثبات العينة: 12 شهراً

الوزن: 36 جراماً








أخصائص الأداء**

الناتج (ميكروجرام)	التركيز (نانوجرام/ميكرو لتر)	نسبة A _{260/280}	المتوسط ± الانحراف المعياري
36.0 ± 41.1	76.3 ± 78.0	1.7 ± 0.1	المتوسط ± الانحراف المعياري
27.0	52.1	1.7	الوسيط
≥ 7.5	≥ 16.0	≥ 1.6	90% من العينات

** تم الحصول على البيانات باختبار 450 عينة من 245 فرداً.

تم ترخيص Oragene®Dx للاستخدام في التشخيص في المختبر في الولايات المتحدة الأمريكية. حصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء (FDA) للاستخدام في التشخيص في المختبر باستخدام اختبار eSensor لكشف الحسابية للورافارين من خلال اللعب. Oragene® هي علامة تجارية مسجلة، وGenoFIND هي علامة تجارية لصالح DNA Genotek Inc. جميع العلامات التجارية والأسماء المضمنة هنا تعود لمالكها ذوي الصلة. براءة الاختراع (www.dnagenotek.com/legalnotices)

عملية جمع سهلة

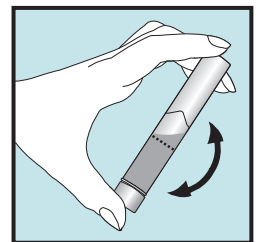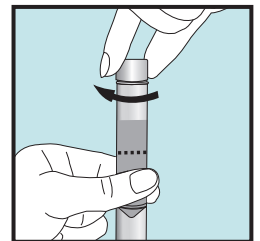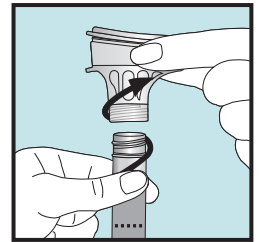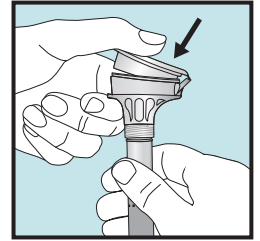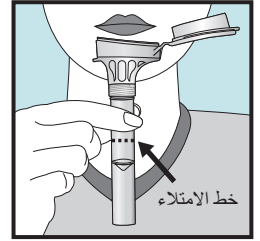

يمكن العثور على التعليمات الكاملة للجمع على موقعنا الإلكتروني.

اطلب مجموعات جمع عينات مجانية على الموقع الإلكتروني www.dnagenotek.com

عينات فائقة الدقة

أداء مثبت الجودة

DNA genotek

www.dnagenotek.com

PD-BR-00307 (AR - Arabic) Issue 2/2019-07

© 2019 DNA Genotek Inc. هي شركة فرعية تابعة لشركة OraSure Technologies، جميع الحقوق محفوظة.