

РУССКИЙ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Большинству людей для сбора образца слюны (этапы 1–5) требуется от 2 до 5 минут.



Меры предосторожности при сборе слюны:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ принимать пищу, пить, курить или пользоваться жевательной резинкой в течение 30 минут до сбора слюны.

НЕ снимать пластмассовую пленку с крышки воронки.

Назначение: для сбора образцов ДНК человека из слюны.

Содержимое: в наборе содержится стабилизирующая жидкость.

Предупреждения и меры предосторожности: при попадании стабилизирующей жидкости в глаза или на кожу промыть их водой. Не принимать внутрь. См. паспорт безопасности на веб-сайте www.dnagenotek.com.

Маленькая крышка при попадании в дыхательные пути может привести к удушью.

Хранить при: 15°C / 30°C

Общие сведения о наборе и пояснения:


Набор Oragene-Dx для самостоятельного сбора содержит материалы для сбора и стабилизации образцов слюны, а также инструкции.

Условные обозначения на этикетке:


	См. инструкцию-вкладыш
	Использовать для сбора слюны до (годен до)
	Медицинское изделие для диагностики in-vitro
	Номер в каталоге
	Маркировка CE
	Осторожно! См. инструкцию по применению
	Инструкция по хранению
	Уполномоченный представитель
	Производитель
	Номер партии




1 Сплюньте в воронку до тех пор, пока количество жидкой (не пенистой) части слюны не достигнет уровня, показанного на рисунке 1.

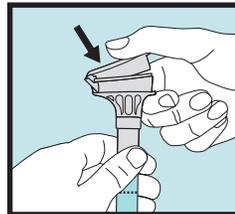


2 Удерживайте пробирку вертикально одной рукой. Закройте крышку воронки другой рукой (см. рисунок), с усилием нажимая на крышку до тех пор, пока не услышите громкий щелчок. Находящаяся в крышке жидкость перельется в пробирку и смешается со слюной. Убедитесь, что крышка закрыта плотно.

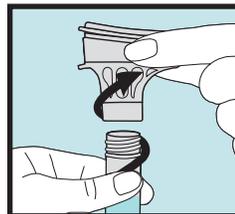

3 Удерживайте пробирку вертикально. Отвинтите воронку от пробирки.

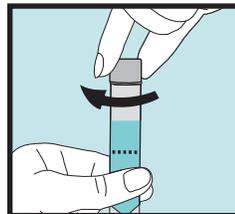

4 Плотно закройте пробирку маленькой крышкой.

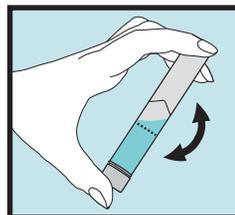

5 Встряхивайте закрытую пробирку в течение 10 секунд. Выбросьте воронку в отходы или отправьте на утилизацию.