


**唾液样本采集管**  
(DNA自采集工作包, Oragene)  
规格型号: Oragene•Dx OGD-575  
Oragene•Dx OGD-675

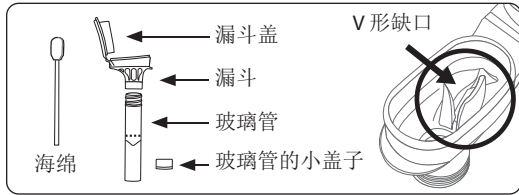

**采集注意事项:**

切勿去除漏斗盖上的塑料膜。

每次将海绵插入供者口腔前, 请检查海绵是否破损。

如果第一块海绵出现磨损或破裂, 请使用第二块海绵。

切勿使用其他的海绵或棉签替代。

预期用途: 用于人类唾液样本的采集。

指定用途: 从唾液样本搜集人 DNA。

内容: 工具包中含有稳定液体。

产品描述: 产品由漏斗盖、漏斗、管、海绵、管盖及稳定液组成。

**警告和预防措施:**

窒息危险:

- 采集工具包中含有小盖子。
- 塑料袋中含有海绵。
- 在将海绵插入供者的口腔时, 应小心谨慎。

**针对监督式采集:**

- 请照看好供者。
- 切勿准许供者处理海绵、小盖子或包装。
- 如果稳定液体接触到您的眼睛或皮肤, 请用水清洗干净。切勿吞食。请登陆 [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) 查阅化学品安全技术说明书 (MSDS)。

储存: 15°C 至 30°C

**工具包的概述和说明:**

Oragene•Dx 是一个为采集并稳定唾液样品而提供材料和说明的辅助采集工具包。

保质期: 24个月

收集到DNA的存储期: 12个月

生产日期: 见产品本身

**标签文字说明:**

-  查阅包装内的说明书
-  唾液采集方式 (有效期)
-  体外诊断医疗设备
-  目录号
-  CE 标志
-  注意, 请查阅使用说明
-  15°C / 30°C 存储说明
-  获授权代表
-  制造商
-  批号

## 使用说明


采集前, 请阅读所有说明。

**步骤:**


请确保供者在采集唾液样品前 30 分钟内不要进食、饮水、吸烟或嚼口香糖。

请确保供者在样品采集过程中保持直立状态。


遵循步骤 1 至 7 采集唾液样品可至多花费 15 分钟。

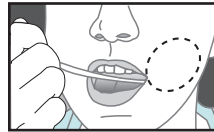

- 1** 将一块海绵置于颊囊中。沿着牙床和内脸颊轻柔地移动海绵 30 秒, 以尽可能多地吸收唾液。

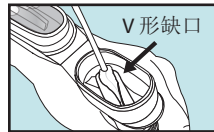


- 2** 当海绵浸满唾液后, 将其插入漏斗的 V 形缺口。采用与 V 形缺口内壁相反的扭转和推挤动作来拧出海绵中的唾液。唾液将流入玻璃管中。

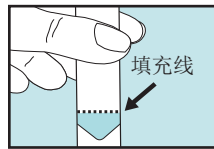


- 3** 重复上述步骤 (1 至 2) 使用该块相同的海绵, 直至液体唾液 (而非气泡) 达到填充线高度。每次将海绵插入供者口腔前, 请检查海绵是否破损。如果第一块海绵出现磨损或破裂, 请使用第二块海绵。


轻拍玻璃管底部的硬面, 以减少气泡数量。

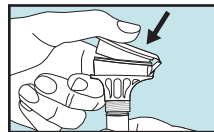

- 4** 单手持玻璃管, 令其处于直立状态。另一只手用力按压盖子 (如图所示), 将盖子盖紧, 直到听见响亮的咔嚓声。盖子中的液体将流入玻璃管, 同唾液混合。确保盖子盖紧。

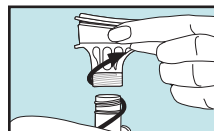

- 5** 保持玻璃管处于直立状态。从玻璃管上拧下漏斗。

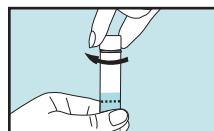

- 6** 使用小盖子盖紧玻璃管。



- 7** 摇晃加盖的玻璃管 5 秒钟。丢弃漏斗和海绵。



用于体外诊断

**DNAGENOTEK™**

生产企业/备案人: ■ DNA Genotek Inc.  
(DNA 吉诺特克股份有限公司)  
生产企业地址/备案人住所:  
3000 - 500 Palladium Drive,  
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757  
传真: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

**代理人及售后服务机构:**

名称: 北京捷通康诺医药科技有限公司  
地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街20号1幢8层811B  
电话: 010-65889599  
传真: 010-65889119

备案凭证编号: 国械备20170946号

产品技术要求编号: 国械备20170946号

OGD-575 和 OGD-675 Oragene®Dx 已在美国获批用于体外诊断用途。

\*Oragene 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。

有些地区可能无法购买部分 DNA Genotek 产品, 详情请联系您的销售代表。

所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用说明均可在我们网站 ([www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)) 的“支持”部分获得。

专利 ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2021 OraSure Technologies, Inc. 旗下公司 DNA Genotek Inc., 保留所有权利

PD-PR-00599 (ZH - Chinese) Issue 4/2021-03 说明书修订日期: 4/2021-03