

ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:



ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੁੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਈ ਨੈਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਰਾਦਤਨ ਵਰਤੋਂ: ORAcollect®·Dx ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ DNA ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FDA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਣਵੀਂ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਉਪਯੋਗਾਂ (molecular diagnostic applications) ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ORAcollect·Dx ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਸ਼: ਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

- ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ।
- ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ; ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਫੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ DNA ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਸਟੇਮੀਆ (ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ DNA ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਲੋ ਨਾ। www.dnagenotek.com 'ਤੇ MSDS ਦੇਖੋ।


ਸਟੋਰੇਜ਼: 15 | 25°C

ਲੇਬਲ ਸੰਕੇਤਿਕਾ:


	ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ
	ਬਣਾਵਟੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਡੀਵਾਈਸ
	CE ਮਾਰਕਾ
	ਨਿਰਮਾਤਾ
	ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
15°C 25°C	ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬਾਬਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
	ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ (ਵਰਤੋ)
	ਲਾਟ ਨੰਬਰ

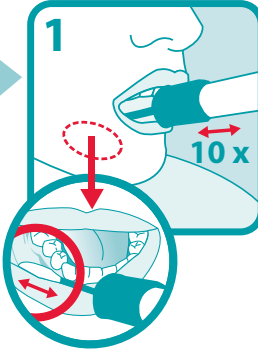


ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੀ ਨੈਕ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਬਗੈਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁ ਪਿਛੇ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਚਲੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜੋ (ਕਲੇਜ਼ ਅੱਪ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ)। ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਰਗੜੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

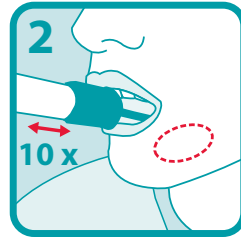


ਰਗੜਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਚਲੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਓ।

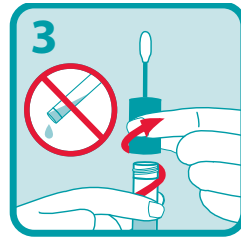

ਟਿਊਬ ਵਿਚਲੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕੜੋ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਬਗੈਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਤਾਰੋ।

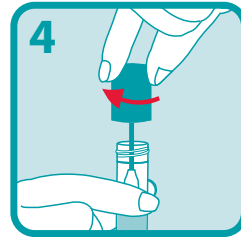

ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

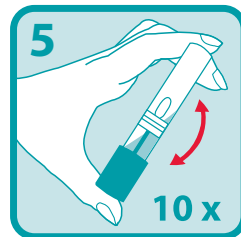

ਢੱਕਣ ਲੱਗੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ।