


**Precauzioni per la raccolta:**

**Il donatore NON deve mangiare, bere, fumare o masticare gomma per i 30 minuti che precedono la raccolta del campione di saliva.**

**Assicurarsi che la punta della spugna NON entri in contatto con alcuna superficie prima della raccolta.**

**Uso previsto:** ORAc collect·Dx è destinato alla raccolta non invasiva di campioni di saliva. Il DNA umano viene isolato dal campione di saliva, stabilizzato e reso idoneo per l'uso nelle applicazioni diagnostiche molecolari approvate dalla FDA. I campioni di saliva raccolti usando ORAc collect·Dx sono stabilizzati e possono essere trasportati e/o conservati a lungo a temperatura ambiente.












**Contenuto:** il kit contiene liquido stabilizzante.

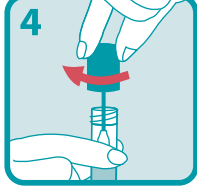
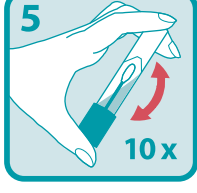
**Avvertenze e precauzioni:**

- Solo per Rx. Per uso professionale.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima della raccolta del campione; si possono verificare scostamenti in un campione inadeguato e questi possono influenzare negativamente la resa del DNA.
- Rischio di soffocamento. Occorre inserire la spugna in bocca con cautela.
- I donatori che soffrono di xerostomia (bocca secca) potrebbero non raccogliere un campione adeguato seguendo queste istruzioni e il risultato sarebbe una minore resa di DNA e un campione non idoneo all'uso.
- Lavare con acqua se il liquido stabilizzante venisse a contatto con gli occhi o con la pelle. NON ingerire. Vedere la scheda dati sicurezza materiale su [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Conservazione:** tra 15°C e 25°C

**Legenda dell'etichetta:**

	Numero di catalogo
	Dispositivo medico diagnostico per diagnosi in vitro
	Contrassegno CE
	Contrassegno UKCA
	Produttore
	Dispositivo medico
	Non riutilizzare
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Raccogliere il campione entro (Utilizzare entro)
	Numero di lotto
	Rappresentante autorizzato

	<p>Aprire la confezione e rimuovere il raccoglitore senza toccare la punta della spugna. Posizionare la spugna più indietro possibile in bocca purché non crei disagio e sfregare lungo le gengive inferiori (vedere immagine ravvicinata) con un movimento avanti e indietro. Sfregare delicatamente le gengive 10 volte. Se possibile evitare di sfregare i denti.</p>
	<p>Ripetere delicatamente il movimento di sfregamento dal lato opposto della bocca lungo le gengive inferiori per altre 10 volte.</p>
	<p>Tenere la provetta in verticale per impedire che il liquido stabilizzante all'interno della provetta si versi. Svitare il cappuccio blu dalla provetta di raccolta senza toccare la spugna.</p>
	<p>Capovolgere il cappuccio, inserire la spugna nella provetta e chiudere bene il cappuccio.</p>
	<p>Capovolgere la provetta con il cappuccio inserito e scuoterla vigorosamente 10 volte.</p>