



Varnostni ukrepi jemanja:

Darovalec NE sme jesti, piti, kaditi ali žvečiti žvečilnega gumija pred jemanjem vzorca sline.

Zagotovite, da gobasta konica NE pride v stik z katero koli površino pred jemanjem vzorca.

Nameravana uporaba: ORAc collect®·Dx je namenjena za uporabo v neinvazivnem jemanju vzorcev sline. Človeški DNA iz vzorca sline je izoliran, stabiliziran in primeren za uporabo v molekularnih diagnostičnih aplikacijah, ki jih pojasnjuje FDA. Vzorci sline, ki se jemljejo z uporabo ORAc collect·Dx so stabilizirani in se lahko prevažajo in/ali dolgotrajno shranjujejo v okoljskih pogojih.












Vsebuje: Oprema vsebuje stabilizatorsko tekočino.

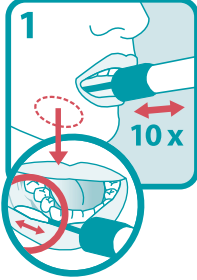
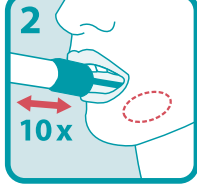

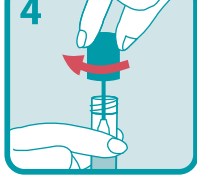
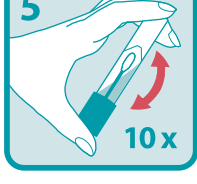
Svarila in varnostni ukrepi:

- Samo Rx. Za profesionalno uporabo.
- Pozorno preberite vsa navodila pred jemanjem vzorca; odkloni so morda posledica neustreznega vzorca in vplivajo na korist DNK.
- Nevarnost zadržitve. Morali bi biti previdni, ko vstavljamo gobico v usta.
- Darovalci z kserostomijo (suha usta) morda ne morejo jemati ustreznih vzorcev, tako da uporabljajo ta navodila, zato imajo nižjo DNK korist in neveljaven vzorec za uporabo.
- Sperite z vodo, če stabilizatorska tekočina pride v stik z očmi ali kožo. NE zaužijte.
- Glejte MSDS na www.dnagenotek.com

Shranjevanje: 15°C-25°C

Legenda na etiketi:

-  Številka kataloga
-  Umetna diagnostična medicinska naprava
-  CE označitev
-  UKCA označitev
-  Izdelovalec
-  Medicinska naprava
-  Ne uporabite ponovno
-  Upoštevajte navodila za uporabo
-  Jemljite vzorec (Porabiti do)
-  Številka dela
-  Pooblaščen predstavnik

	<p>Odprite embalažo in odstranite nabiralca, ne da bi se dotikali gobaste konice. Položite gobico toliko nazaj v ustih, kot je udobno in podrgnite vzdolž spodnje dlesni (glejte sliko od blizu), da jo premikate nazaj in naprej. Nežno podrgnite dlesni 10 krat. Če je možno, se izognite drgnjenju zob.</p>
	<p>Nežno ponovite kretnje drgnjenja na nasprotni strani ust vzdolž z spodnjo dlesnijo dodatno še 10 krat.</p>
	<p>Cevko držite pokončno, da preprečite, da se stabilizatorska tekočina v cevki ne razliva. Odvijte moder pokrov iz cevke za jemanje, ne da bi se dotaknili gobice.</p>
	<p>Pokrov obrnite prekucnjeno, vstavite gobico v cevko in tesno zaprite pokrov.</p>
	<p>Pokrito cevko preobrnite in močno pretresite 10 krat.</p>