



Försiktighet vid insamling:

Provgivaren bör **INTE** äta, dricka, röka eller tugga tuggummi 30 minuter innan insamling av ett oralt prov.

Var noga med att svabbspetsen **INTE** kommer i kontakt med något innan insamling.

Avsedd användning: ORACollect[®]Dx är avsedd för användning vid icke-invasiv insamling av salivprover. Mänskligt DNA från salivprovet isoleras och stabiliseras och är lämpligt för användning i FDA-godkänd molekyllär diagnostik. Salivprover som samlas in med ORACollect[®]Dx är stabiliserade och kan transporteras och/eller lagras under lång tid i lämpliga förhållanden.












Innehåll: Kitet innehåller stabiliseringsvätska.

Varningar och försiktighet:

- Endast på ordination. Endast för professionellt bruk.
- Läs alla anvisningar noggrant innan insamling av prov - avvikelser kan leda till ett otillräckligt prov och påverka DNA-insamlingen.
- Kvävningrisk. Försiktighet bör iaktas när svabben förs in i munnen.
- Provgivare med xerostomi (muntorrhet) kanske inte kan lämna ett tillräckligt prov enligt dessa anvisningar, vilket resulterar i lägre DNA-insamling och ett oanvändbart prov.
- Tvätta med vatten om stabiliseringsvätska kommer i kontakt med ögon eller hud. Intag **INTE**. Säkerhetsdatablad finns på www.dnagenotek.com

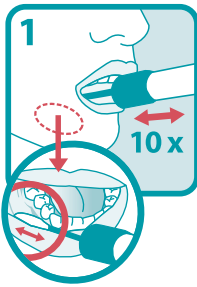
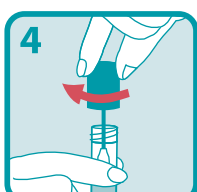
Förvaring: 15 °C-25 °C

Etiketter:

	Katalognummer
	Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
	CE-märkning
	UKCA-märkning
	Tillverkare
	Medicinteknisk produkt
	Endast engångsbruk
	Läs anvisningarna innan användning
	Sista insamlingsdag (Sista förbrukningsdag)
	Batchnummer
	Auktoriserad representant

SVENSKA

Procedur för insamling av salivprov:

	<p>Öppna förpackningen och ta ut svabben utan att vidröra svabbspetsen. För in svabben så långt bak i sidan av munnen som möjligt och gnugga mot det nedre tandkötet (se närbild) fram och tillbaka. Gnugga försiktigt mot tandkötet 10 gånger. Undvik helst att gnugga mot tänderna.</p>
	<p>Upprepa gnuggningen försiktigt på motsatt sida av munnen längs det nedre tandkötet ytterligare 10 gånger.</p>
	<p>Håll röret upprätt för att undvika att stabiliseringsvätskan i röret spills ut. Skruva av det blå locket från provröret utan att vidröra svabben.</p>
	<p>Vänd locket upp och ned, för in svabben i röret och skruva åt locket ordentligt.</p>
	<p>Vänd det stängda röret upp och ned och skaka ordentligt 10 gånger.</p>