

Utilizare prevăzută: pentru colectarea asistată de ADN uman din probe de salivă.

Conținut: setul conține lichid stabilizator.

Avertismente și precauții:

Pericole de sufocare:

- Capacul mic din setul de colectare.
- Pungă de plastic care conține bureți.
- Se va da dovadă de precauție la introducerea buretelui în gura donatorului.

Pentru colectări supravegheate:

- NU lăsați donatorul nesupravegheat.
- NU permiteți donatorului să manipuleze buretele, capacul mic sau ambalajul.
- Spălați cu apă dacă lichidul stabilizator intră în contact cu ochii sau pielea. Nu înghițiți. Consultați fișa tehnică de securitate la www.dnagenotek.com.

Depozitare: 15°C-30°C (59°F-86°F)

Rezumat și detalii despre set:

Oragene-Dx este un set de colectare asistată care oferă materialele și instrucțiunile pentru colectarea și stabilizarea specimenelor de salivă.












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
Precauții privind colectarea:

NU scoateți folia de plastic de pe capacul pâlniei.

Verificați de fiecare dată dacă buretele este deteriorat înainte de a-l introduce în gura donatorului. Utilizați al doilea burete dacă primul burete prezintă semne de uzură.

NU înlocuiți cu alți bureți sau tampoane.

Legenda etichetei:

	Număr de catalog
	Dispozitiv medical de diagnostic in vitro
	Marcaj CE
	Marcaj UKCA
	Producător
	Dispozitiv medical
	Nu refolosii
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Colectați saliva până la (dată de valabilitate)
	Număr lot
	Reprezentant autorizat
	Atenție

Pentru diagnostic in vitro



Pentru rețete și utilizare în regim „direct către consumator”

DNAGENOTEK™

*Probe superioare
Performanță dovedită*

Fabricat în Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Fără taxă (America de Nord): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

Instrucțiuni de utilizare

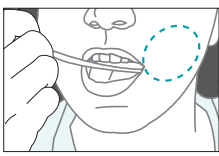
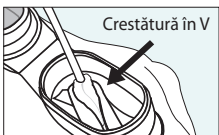
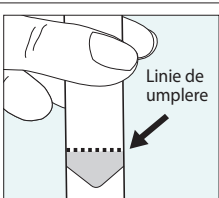
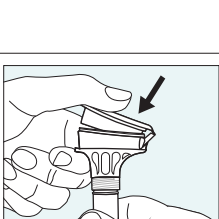
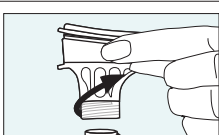
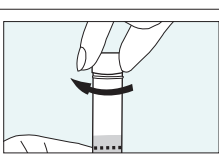
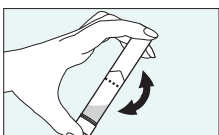
Citiți toate instrucțiunile înainte de colectare.

Procedura:

Asigurați-vă că donatorul NU mănâncă, nu bea, nu fumează și nu mestecă gumă timp de 30 de minute înainte de a colecta o mostră de salivă.

Asigurați-vă că donatorul este în poziție verticală în timpul colectării mostrei.

Procedura de colectare a unei probe de salivă poate dura până la 15 minute, urmând pașii de la 1 la 7.

	1 Puneți un burete pe interiorul obrazului. Mișcați ușor buretele de-a lungul gingiilor și interiorului obrazilor timp de 30 de secunde pentru a absorbi cât mai multă salivă posibil.
	2 După ce buretele este saturat cu salivă, introduceți buretele în creștătura în V a pâlniei. Stoarceți saliva din burete folosind o mișcare de răsucire și împingere pe peretele interior al creștăturii în V. Saliva va curge în tub.
	3 Repetați acești pași (1 până la 2) CU ACELAȘI BURETE până când saliva lichidă (nu bulele) ajunge la linia de umplere. Verificați de fiecare dată dacă buretele este deteriorat înainte de a-l introduce în gura donatorului. Utilizați al doilea burete dacă primul burete prezintă semne de uzură. Bateți fundul tubului de o suprafață dură pentru a reduce numărul de bule.
	4 Țineți tubul în poziție verticală cu o mână. Închideți capacul cu cealaltă mână, împingând ferm capacul până când auziți un clic puternic. Lichidul din capac va fi eliberat în tub pentru a se amesteca cu saliva. Asigurați închiderea etanșă a capacului.
	5 Țineți tubul în poziție verticală. Deșurubați pâlnia de pe tub.
	6 Utilizați capacul mic pentru a închide bine tubul.
	7 Agitați tubul cu capac timp de 5 secunde. Aruncați pâlnia și bureții.

Consultați instrucțiunile suplimentare de utilizare a sistemului PD-HB-00001 la adresa www.dnagenotek.com

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Persoana responsabilă din Marea Britanie: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Sponsor australian: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

Oragene este o marcă comercială înregistrată, iar DNA Genotek este o marcă comercială a DNA Genotek Inc. Este posibil ca unele produse DNA Genotek să nu fie disponibile în toate regiunile geografice; contactați reprezentantul dvs. de vânzări pentru detalii.

Toate protocoalele, rapoartele și notele de aplicare DNA Genotek sunt disponibile în secțiunea de asistență a site-ului nostru web la adresa www.dnagenotek.com.

Brevet (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genotek Inc., o filială a OraSure Technologies, Inc., toate drepturile rezervate.
PD-PR-01180 (RO - Romanian) Issue 1/2021-05