



**Ettevaatusabinõud proovivõtmisel:**

**Doonor EI tohi süüa, juua, suitsetada ega närimiskummi närida 30 minutit enne süljeproovi võtmist.**

**Veenduge, et kásna ots EI puutuks enne proovivõtmist kokku ühegi pinnaga.**

**Kavandatud kasutus:** ORAcollect®-Dx on kavandatud süljeproovide mitteinvasiivseks kogumiseks. Süljeproovist saadud inim-DNA isoleeritakse, stabiliseeritakse ning see sobib kasutuseks FDA poolt lubatud molekulaardiagnostika rakendusteks. ORAcollect.Dx abil võetud süljeproovid on stabiliseeritud ja neid võib transportida ja/või pikka aega säilitada tavapärares keskkonnatingimustes.

**Sisu:** komplekt sisaldab stabiliseerivat vedelikku.

**Hoiatused ja ettevaatusabinõud:**

- Ainult retseptiga. Kutseliseks kasutuseks.
- Lugege enne proovivõtmist juhised hoolikalt läbi; mittejärgimise tulemuseks võib olla sobimatu proov ja see võib mõjutada DNA kogust.
- Lämpumisoht. Kásna suhupanemisel tuleb olla ettevaatlik.
- On võimalik, et doonorid, kellel on kserostoomia (suukuivus), ei saa nende juhiste abil sobivat proovi koguda ning tulemuseks on väiksem DNA kogus ja kasutamiseks mittesobiv proov.
- Peske veega, kui stabiliseerivat vedelikku satub silma või nahale. MITTE alla neelata. Vt MSDS-i veebilehelt [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Säilitamine:** 15 °C – 25 °C

**Etiketi tekst:**

- Katalooginumber
- In vitro* diagnostika meditsiiniaseade
- CE-märgis
- UKCA-märgis
- Tootja
- Meditsiiniaseade
- Ärge kasutage uuesti
- Tutvuge kasutusjuhendiga
- Proov võtta enne (kõlblik kuni)
- Partii number
- Volitatud esindaja

	<p>Avage pakend ja eemaldage kollektor ilma kásna otsa puudutamata. Lükake kásn nii kaugele suu tagaossa, kui teile mugav tundub, ja hõõruge sellega alumisi igemeid (vt lähivõte), liigutades kásna edasi-tagasi. Hõõruge igemeid õrnalt 10 korda. Kui võimalik, siis vältige hammaste hõõrumist.</p>
	<p>Korrake hõõrumisliigutusi õrnalt suu teise poole alumistel igemetel veel 10 korda.</p>
	<p>Hoidke tuubi püsti, et vältida tuubis oleva stabiliseeriva vedeliku väljavoolamist. Keerake proovivõtutuubi sinine kork lahti ilma kásna puutumata.</p>
	<p>Keerake kork tagurpidi, sisestage kásn tuubi ja keerake kork kõvasti kinni.</p>
	<p>Keerake korgiga suletud tuub ümber ja loksutage seda jõuliselt 10 korda.</p>