



**Środki ostrożności dotyczące pobierania:**

**Dawca NIE powinien jeść, pić, palić ani żuć gumy na 30 minut przed pobraniem próbki śliny.**

**Przed pobraniem należy upewnić się, że końcówka gąbki NIE styka się z żadną powierzchnią.**

**Przeznaczenie:** produkt ORAcollect<sup>®</sup>Dx jest przeznaczony do nieinwazyjnego pobierania próbek śliny. Ludzkie DNA z próbki śliny jest izolowane, stabilizowane i nadaje się do użycia w zatwierdzonych przez FDA zastosowaniach do diagnostyki molekularnej. Próbki śliny pobrane przy użyciu ORAcollect-Dx są stabilizowane i mogą być transportowane i/lub przechowywane przez długi czas w warunkach otoczenia.


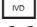



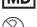





**Zawartość:** zestaw zawiera płyn stabilizujący.

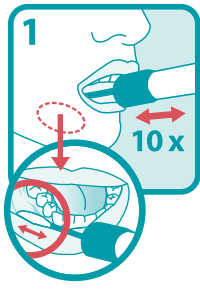

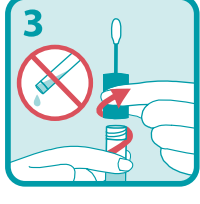
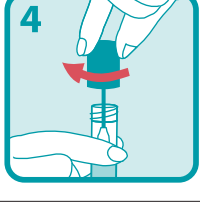
**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- Tylko na receptę. Do użytku profesjonalnego.
- Przed pobraniem próbki należy przeczytać uważnie wszystkie instrukcje; w wyniku odstępstwa próbka może być nieodpowiednia i może mieć to wpływ na ilość uzyskanego DNA.
- Ryzyko zadławienia. Należy zachować ostrożność przy wkładaniu gąbki do ust.
- Dawcy z kserostomią (suchość w jamie ustnej) mogą nie być w stanie pobrać odpowiedniej próbki zgodnie z niniejszymi instrukcjami, w wyniku czego ilość uzyskanego DNA będzie mniejsza, a próbka niezdatna do użycia.
- Jeśli płyn stabilizujący dostanie się do oczu lub na skórę, należy przemyć je wodą. NIE połykać. Patrz MSDS na stronie [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Przechowywanie:** 15–25°C

**Legenda etykiety:**

-  Numer katalogowy
-  Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro
-  Oznaczenie CE
-  Oznaczenie UKCA
-  Producent
-  Wyrób medyczny
-  Nie używać ponownie
-  Sprawdzić instrukcje użycia
-  Termin pobrania próbki (Termin ważności)
-  Numer partii
-  Autoryzowany przedstawiciel

	<p>Otwórz opakowanie i wyjmij szpatułkę bez dotykania końcówki gąbki. Umieść gąbkę tak głęboko w ustach, jak to możliwe bez powodowania dyskomfortu, i pocieraj wzdłuż dolnych dziąseł (patrz zbliżenie) ruchem do tyłu i do przodu. Delikatnie potrzyj dziąsła 10 razy. Jeśli to możliwe, unikaj pocierania zębów.</p>
	<p>Delikatnie powtórz ruch pocierania dodatkowe 10 razy po przeciwnej stronie jamy ustnej, wzdłuż dolnych dziąseł.</p>
	<p>Trzymaj próbkę pionowo, aby zapobiec rozlaniu płynu stabilizującego znajdującego się wewnątrz próbki. Odkręć niebieską zatyczkę z próbki do pobierania, nie dotykając gąbki.</p>
	<p>Odwróć zatyczkę do góry nogami, włóż gąbkę do próbki i szczelnie zamknij.</p>
	<p>Odwróć zamkniętą próbkę i energicznie potrząśnij nią 10 razy.</p>