



Precauții privind colectarea:

Donatorul NU trebuie să mănânce, să bea, să fumeze sau să mestече gumă timp de 30 de minute înainte de a se colecta proba de salivă.

Asigurați-vă că vârful buretelui NU intră în contact cu nicio suprafață înainte de colectare.

Utilizare intenționată: ORAcollect®-Dx este destinat utilizării în colectarea neinvazivă a probelor de salivă. ADN-ul uman din proba de salivă este izolat, stabilizat și adecvat pentru utilizare în aplicații de diagnosticare moleculară autorizate de FDA. Probele de salivă colectate folosind ORAcollect-Dx sunt stabilizate și pot fi transportate și/sau depozitate pe termen lung în condiții ambientale.












Conținut: Kit-ul conține lichid stabilizator.

Avertismente și precauții:

- Numai pe bază de rețetă. Pentru uz profesional.
- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de colectarea probelor; nerespectarea lor poate avea ca rezultat o probă inadecvată, iar randamentul ADN-ului poate fi afectat.
- Pericol de sufocare. Trebuie să aveți grijă atunci când introduceți buretele în gură.
- Este posibil ca donatorii cu xerostomie (gură uscată) să nu poată colecta adecvat proba pe baza acestor instrucțiuni, rezultând un randament mai scăzut al ADN-ului și o probă inutilizabilă.
- Spălați cu apă dacă lichidul stabilizator sau proba intră în contact cu ochii sau pielea. NU înghițiți. Consultați fișa tehnică de securitate la www.dnagenotek.com

Depozitare: 15°C-25°C

Legendă etichetă:

-  Număr catalog
-  Dispozitiv medical de diagnostic in vitro
-  Marcaj CE
-  Marcaj UKCA
-  Producător
-  Dispozitiv medical
-  Nu refolosiți
-  Consultați instrucțiunile de utilizare
-  Colectați proba până la (Data expirării)
-  Număr lot
-  Reprezentant autorizat

<p>1</p>	<p>Deschideți pachetul și scoateți colectorul fără a atinge vârful buretelui. Așezați buretele cât mai în spatele cavității bucale, în limitele confortului, și frecăți de-a lungul gingiilor inferioare (a se vedea imaginea de aproape), înapoi și înainte. Frecăți ușor gingiile de 10 ori. Dacă este posibil, evitați frecarea dinților.</p>
<p>2</p>	<p>Repețiți ușor mișcarea de frecare pe partea opusă a gurii, de-a lungul gingiilor inferioare, încă de 10 ori.</p>
<p>3</p>	<p>Țineți tubul în poziție verticală pentru a preveni scurgerea lichidului stabilizator din interiorul tubului. Deșurubați capacul albastru din tubul de colectare fără a atinge buretele.</p>
<p>4</p>	<p>Întoarceți capacul cu capul în jos, introduceți buretele în tub și închideți strâns capacul.</p>
<p>5</p>	<p>Răsturnați tubul cu capac și agitați energic de 10 ori.</p>