

Acessório de sanita OM-AC1

Utilizado com  OMNigene®-GUT


INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

Este acessório de sanita é utilizado com o kit OMNigene®-GUT para facilitar a recolha de amostras fecais.


Cuidado: NÃO permitir que água da sanita, urina, detergente ou ambientador entre em contacto com este acessório de sanita.

Armazenamento: 15 °C a 25 °C


Procedimento:

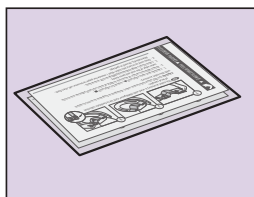


- 1** São fornecidos dois acessórios de sanita para o caso de não ser possível recolher uma amostra à primeira tentativa.

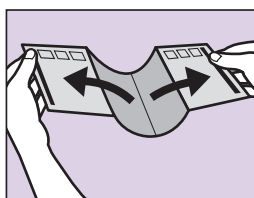


- 2** Descole cuidadosamente a extremidade aberta com ▲; repita para a extremidade com ■.

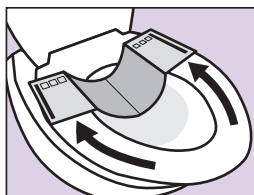

- 3** Fixe a superfície adesiva do acessório à **PARTE DE TRÁS do assento da sanita** com o adesivo próximo da extremidade exterior do assento e pressione fortemente.

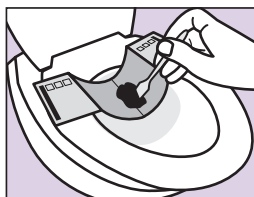

- 4** Recolha a amostra fecal respeitando as instruções do utilizador do OMNigene-GUT.

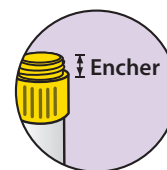

- 5** Deite o acessório utilizado na sanita. Aguarde 1 minuto para que o papel amoleça e, em seguida, despeje o autoclismo. Em alternativa, deite no lixo.

DNA genotek



O OM-AC1 é produzido nos Países Baixos para a DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canadá K2V 1C2

Amostras superiores
Desempenho comprovado

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNigene é uma marca comercial registada da DNA Genotek Inc. Alguns produtos DNA Genotek poderão não estar disponíveis em todas as regiões geográficas. Contacte o seu representante comercial para mais informações. Todos os protocolos, livros brancos e notas de aplicação da DNA Genotek encontram-se disponíveis na secção de apoio do nosso website em www.dnagenotek.com.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek Inc., uma subsidiária da OraSure Technologies, Inc., todos os direitos reservados.
PD-PR-00842 (PT - Portuguese) Issue 1/2018-11

